

Delta LINK

» Bonding metal - resina «

¡La innovadora unión química Metal-Resina fotopolimerizable para esqueléticos y trabajos sobre implantes!

The innovative light-curing system for metal-resin-bonding for implant and framework dentures!

Der innovative, lighthärtende Metall-Kunststoff-Verbund für die Implantat- und Modellgussprothetik!

Delta Link asegura una excelente unión a largo plazo bajo cargas compresivas, de cizallamiento y tracción, impidiendo resquicios marginales sin someter al metal a elevadas temperaturas.

Delta Link guarantees lasting bonds, excellent adhesiveness under pressure-, shear- and tensile stress. No gaps. No thermal stress on the metal frame.


Delta Link: gewährleistet einen dauerhaften Verbund, hervorragende Haftwerte bei Druck-, Scher-, Zugbelastung. Randspaltfreiheit. Keine thermische Belastung des Metallgerüsts.

► Para cualquier metal y acrílico
With any alloy or resin
Freie Legierungs- und Kunststoffwahl

► Individualización del opaquer
Individualization of clasp with opaquer
Individualisierung beim Opakerauftrag

► Resistente al monómero
Monomer resistant opaquer
Kein Anlösen des Opakers durch Monomer

► Fotopolimerizable en máquinas de mayor o menor potencia. Base UVA (320 – 400 nm)
Polymerizable in any high or low performance light-curing unit in the UVA range (320 – 400 nm)
Polymerisierbar in jedem leistungsstarken, -schwachen Lichtgerät im UVA-Bereich (320 – 400 nm)

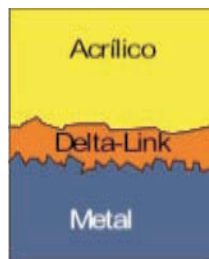

Contiene: Tubo de bonding (7 g.), Opaquer polvo (10 g.), opaquer líquido (10 ml)
Contains: Tube with bonding (7 g.), Opaquer powder (10 g.), Opaquer liquid (10ml)
Enthält: Tube mit Bonding 7gr.), Opaker Pulver (10 g.), Opaker Flüssigkeit (10 ml)

USO I



Chorroado del metal con Al₂O₃
Sandblasting of the metal
Das Metall wird sandgestrahlt



Aplicación del Basic Paste
Application of the basic paste
Auftrag der Basic Paste



Fotopolimerización del Basic Paste
Curing of the basic paste
Lighthärtung der Basic Paste



El resultado: duro y mate
Mat cured bonding
Matter, ausgehärteter Verbund



Aplicación del opaquer (rosa/A3/blanco)
Application of the opaquer (pink/A3/white)
Opakerauftrag (rosa/A3/weiß)



Opacquer fotopolimerizado
Light-cured opaquer
Lichtgehärteter Opaker



La prótesis terminada bajo el punto de vista estético e higiénico
The finished denture in its esthetic and hygienic aspects
Fertige Prothese unter ästhetischen und hygienischen Aspekten



USO II



Esquelético con Basic Paste y opaquer rosa y A3

Framework with bonding and pink/A3 opaquer

Klammerprothese mit Verbund und zahnfarbenen/rosa Opaker



Prótesis combinada con Basic Paste y opaquer rosa y A3

Prosthesis with bonding and opaquer pink/A3

Kombimodellguss mit Verbund und zahnfarbenen/rosa Opaker



Prótesis de larga duración con un paso metal-resina limpio

Finished denture with durable and definite metal-resin partitioning

Fertige Prothese mit dauerhaften, sauberen Metall-Kunststoff-übergängen




USO III



Estructura sobre implantes chorreada y con Basic Paste

Sandblasted implant supported structure with basic paste applied

Sandgestrahlte, implantat-getragene Metallstruktur mit aufgetragener Basic Paste

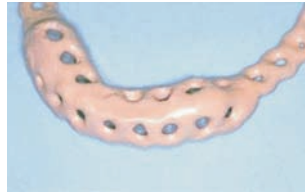

Superficie homogénea del opaquer polimerizado

Cured homogeneous surface of the opaquer

Ausgehärtete homogene Opakeroberfläche



Prótesis con refuerzo metálico de resultado más estético

Prosthesis with metal reinforcement esthetically upgraded

Prothese mit Metallverstärkung ästhetisch aufgewertet



USO IV



Estructura con cofias galvánicas para telescópicas pegadas en boca

The galvanized, telescope supported framework stuck in mouth

Im Mund verklebte, teleskopgetragene Galvanostruktur



Con Basic Paste y opaquer

With basic paste and opaquer

Mit Basic Paste und Opaker

USO V



Utilización del Delta-Link para estructura sobre implantes atornillada

Application of Delta link in a screwed implant supported denture

Anwendung von Delta-Link bei einer verschraubten, implantatgetragenen Versorgung



USO VI



Gancho preparado para la unión

Clasp prepared for the bonding

Für den Verbund vorbereitete Metallklammer



Preparación del color del opaquer

Colouring of the opaquer


Farbgestaltung des Opaker



Gancho con color dentario

Tooth coloured coating of the clasp

Zahnfarbene Verblendung der Klammer

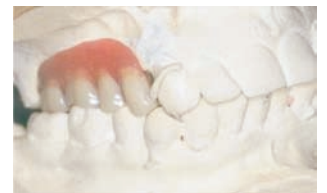

Resultado estético del gancho

Aesthetic coating of the clasp

Ästhetische Klammer-Verblendung

Importador:

KUSS
DENTAL
Innovative Products
Made in Europe

c/ Isabel Colbrand 10 Nave 147
28050 Madrid - España
Tel. + 34 91 736 23 17
Fax. + 34 91 736 23 18
www.kuss-dental.com



Distribuidor: