

INICIO RÁPIDO DISPOSITIVO RAYPLICKER



1

Cargar el aparato antes de la utilización.



2

Colocar primero la funda sobre la guía y luego la boquilla esterilizada en autoclave.



3

Encender el dispositivo pulsando el botón.



4

Seleccionar "Shade-taking" para visualizar la imagen de vídeo. Pulsar el botón para realizar la toma de color. (Ver n.º 3)



5

Hacer clic en la pantalla para visualizar las diferentes cartografías. Suprimir o guardar la toma de color.



6

Transferir los datos desde el programa.



1



2



3



4



5

- 1- Verificar que la boquilla esté bien ubicada.
- 2- La mira gris debe estar paralela a los bordes de la pantalla.
- 3- El paciente debe mantener la boca abierta y respirar por la nariz.
- 4- La lengua y los labios no deben aparecer en la imagen.
- 5- Situar el diente en el centro de la imagen y mantener la boquilla en contacto. No moverse hasta finalizar la adquisición (1 s).


INICIO RÁPIDO PROGRAMA ODONTÓLOGO

1 PÁGINA PRINCIPAL

Importar fichas

Acceso fichas y archivos

Pedido no tratado

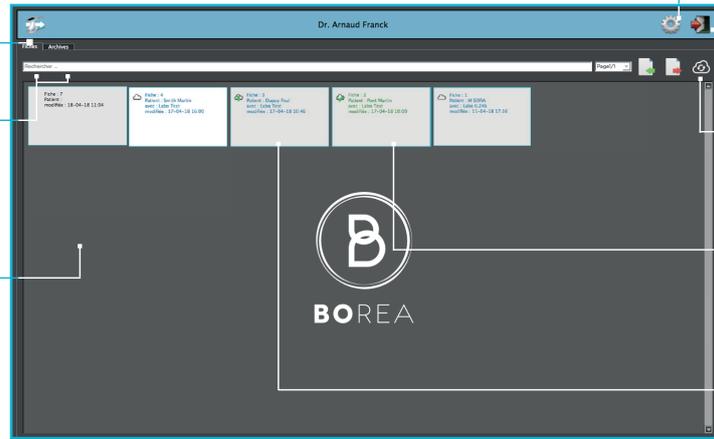

Parámetros

Desconectar usuario

Actualizar Cloud

Pedido finalizado

Pedido en curso

2 PESTAÑA TOMA DE COLOR

Fecha y número de pedido

Definición del contorno del diente

Foto

Cartografía

Translucidez



Selección de dientes


Cambiar de estratificación

Import pictures

3 PESTAÑA PEDIDO

Informaciones sobre la prótesis para pedir/fabricar

Esquema del diente de producción

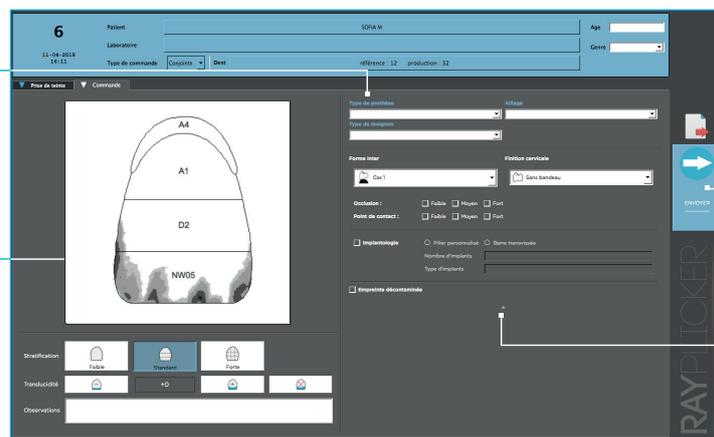

Terminar el pedido

Informaciones complementarias