


StripFIX SISTEMA DE TIRAS DE PULIDO

Sistema de tiras de pulido StripFIX

(Dispositivo de sujeción para tiras de diamante con sistema de conexión fácil, tipo clic)

Existen diferentes tipos de agarre para las tiras de pulido de diamante que sólo permiten la sujeción entre los dedos, y que hacen que el trabajo en boca sea muy difícil debido al limitado espacio disponible. Con el recientemente desarrollado sistema de tiras de pulido StripFIX, el trabajo con tiras de pulido se convierte en una tarea más sencilla y mejor controlada. Este mango ergonómico y fácil de usar con agarre especial, garantiza un mayor control para el uso seguro del sistema de pulido StripFIX. El sistema de conexión clic permite un intercambio fácil y rápido de las tiras de pulido en el soporte. El soporte de las tiras de diamante puede ajustarse en 4 posiciones para fijar la posición (o ángulo) de trabajo óptima de las tiras de diamante y conseguir un acceso más sencillo a dientes anteriores y posteriores. Todos los componentes del sistema de pulido StripFIX son autoclavables y reutilizables.

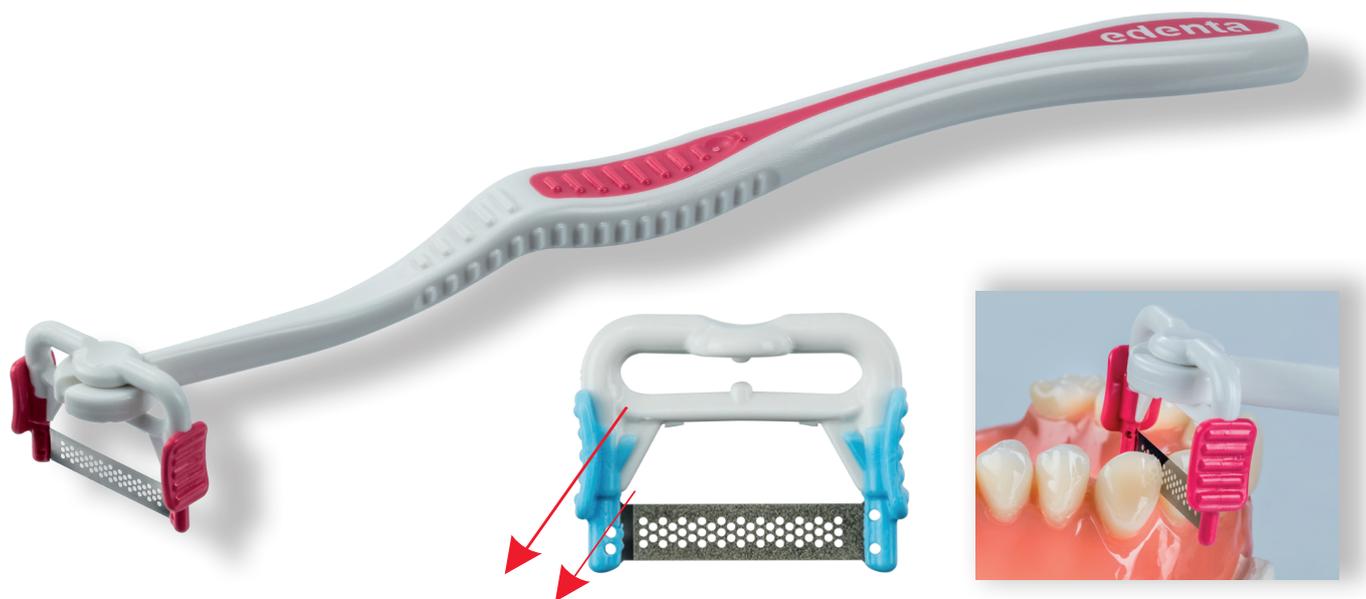

Las pestañas indican de qué lado está diamantada la tira

Aplicaciones

Para la remoción de cemento tras el cementado de coronas, puentes, inlays, onlays o carillas. Para el pulido y acabado en reconstrucciones interproximales, así como también para la remoción de material excedente en las obturaciones. Para la remoción de tinciones a las que no se puede acceder con otros instrumentos. En la reducción interproximal (IPR) para la reducción de esmalte interproximal en ortodoncia.



Soporte de tiras de pulido diamantadas SF-M Grano medio / azul – 45 μ m / 0.13 mm, diamantado por un solo lado




Soporte de tiras de pulido diamantadas SF-F Grano fino / rojo – 30 μ m / 0.10 mm, diamantado por un solo lado



Soporte de tiras de pulido diamantadas SF-SF Grano super fino / amarillo – 15 μ m / 0.08 mm, diamantado por un solo lado



Soporte de tiras de SF-SS Dentado de sierra / blanco – 0.04 mm, sin diamantado

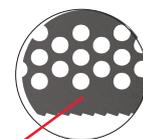

Mango StripFIX (Art. N°. SF-H) para soportes de tiras diamantadas con sistema de conexión clic

El mango ergonómico y de fácil manejo con agarre especial garantiza mayor control para un uso seguro del sistema de pulido StripFix. El sencillo sistema de conexión clic permite un cambio fácil y rápido de los soportes de tiras diamantadas.



Art.-No. SF-H

Posicionamiento de los soportes de tiras diamantadas StripFIX

El soporte de tiras de diamante puede ajustarse en 4 posiciones. De este modo se fija la posición de trabajo óptima (o ángulo) de las tiras diamantadas, permitiendo un acceso sencillo a dientes anteriores y posteriores en la cavidad oral.



Uso sin mango

Los soportes de tiras diamantadas pueden utilizarse de igual manera con o sin el mango, sujetándolos simplemente entre los dedos. El dedo índice se posiciona en el disco donde se inserta la tira de pulido, garantizando así mayor control y un uso seguro de las tiras diamantadas.




Optimizado para su uso manual

StripFIX

Art.-No. SF-SET 1

StripFIX SET

Contiene un mango con sujeción especial y 4 soportes de tiras diamantadas.

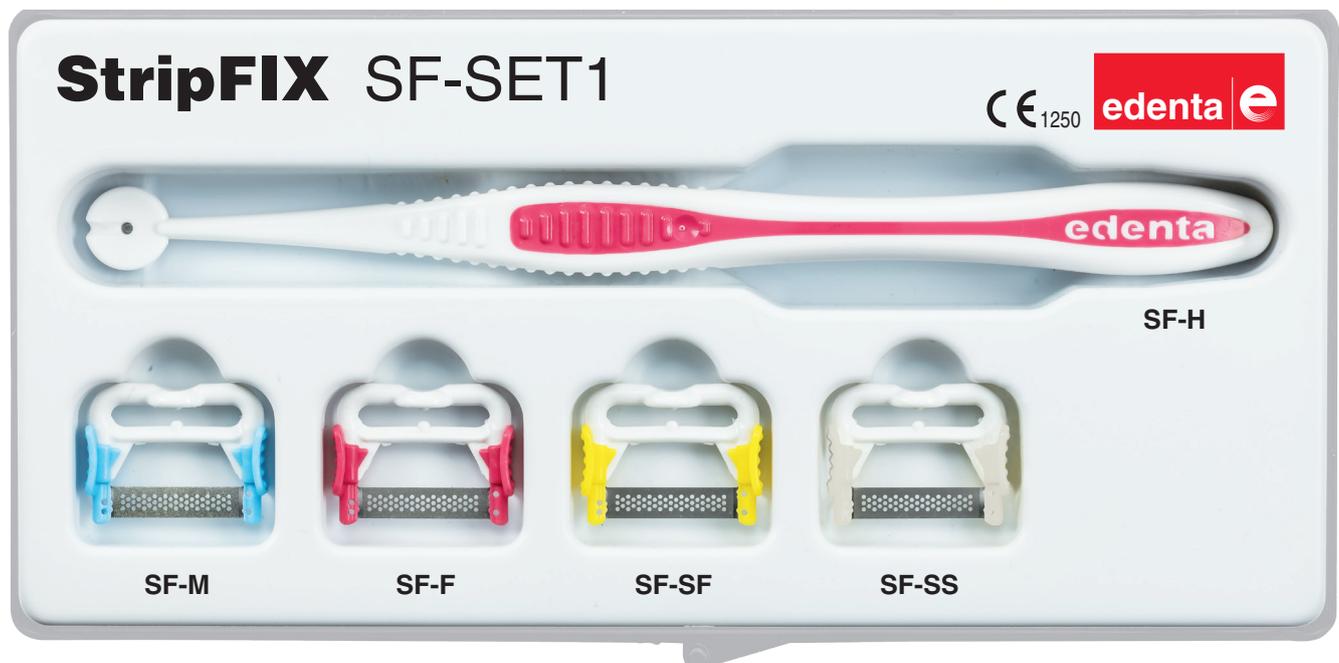

StripFIX Refill SET

Contiene 10 soportes de tiras diamantadas.

Art.-No.

- | | |
|-------|---|
| SF-M | Grano medio / azul – 45 μm / 0.13 mm, diamantado por un solo lado |
| SF-F | Grano fino / rojo – 30 μm / 0.10 mm, diamantado por un solo lado |
| SF-SF | Grano super fino / amarillo – 15 μm / 0.08 mm, diamantado por un solo lado |
| SF-SS | Dentado de sierra / blanco – 0.04 mm, sin diamantado |

