

A high-speed photograph of a water splash, with water droplets and streams captured in mid-air against a light blue background. The splash is centered and occupies most of the frame.

Desinfección

Manos y piel - Superficies - Instrumentos - Impresiones

RHEOSEPT®

Made en Germany



RHEOSEPT- Desinfectante para manos y piel

Desinfección a base de alcohol para manos y piel

Desinfección de amplio espectro a base de alcohol para piel y manos de rápida efectividad. Producto a base de 2-Propanol sin aditivos como colorantes y/o aromas. Adecuado para uso en el área médica como también en la manipulación de alimentos. Autorizado farmacéuticamente para la desinfección higiénica y quirúrgica de piel y manos. Hipoalergénico y libre de agentes irritantes. Este producto protege la piel mediante su "sistema auto hidratante", es especial para pieles sensibles y está comprobado dermatológicamente. Incluido en las listas de la VAH (Asociación Aplicada del Higiene), bajo las directrices de la DGHM (Sociedad Alemana para Higiene y Microbiología). Aplicable de acuerdo con § 18 IFSG (Ley de Protección para la infección), bajo la lista de desinfectantes del RKI (Instituto Robert Koch). Posee un amplio espectro bactericida inclusive TBC, fungicida, virucida (VIH/ VHB/ VHC/ rotavirus/ influenza/ norovirus).

➔ 29020350 RHEOSEPT- Desinfectante para manos (Euro-Botella de 1000 ml)

P.V.P.: 12,95 €



Instrucciones de uso

| Tiempo de acción | Dosificación | Observación |
|--------------------------------|--------------|--|
| Efectivo en 30 segundos | sin diluir | Desinfección higiénica para manos (VHA) |
| Efectivo en 5 minutos | sin diluir | Desinfección quirúrgica para manos (VHA) |
| Efectivo en 1,5 minutos | sin diluir | Desinfección quirúrgica para manos (Informe) EN 12791 |
| Efectivo en 30 segundos | sin diluir | RKI-Lista A |
| Efectivo en 60 segundos | sin diluir | Virus con cubierta proteica (cápside) (VIH, VHB, VHC, Gripe, H5N1, VDVB, VACV) |
| Efectivo en 60 segundos | sin diluir | Noro-Virus (MNV) EN14476 |



RHEOSOL-3-Step Protección de manos

Crema de cuidado de piel

Crema suave para el cuidado de la piel. Crea una protección de la piel gracias a componentes revitalizantes y de cuidado. Alivia la piel después de una irritación y una agresión fuerte. Ideal para el cuidado durante y después de procesos de trabajos agresivos a la piel debido a la formulación de absorción rápida.

➤ 24006612 RHEOSOL-3-Step Protección de mano (Tubo de 125 ml)

P.V.P.: 4,76 €

RHEOSEPT-ID plus

Desinfectante para instrumental con efecto de limpieza efectivo

RHEOSEPT-ID plus es un concentrado para desinfección y limpieza de instrumentos sanitarios y equipos de laboratorio. Protege los instrumentos contra la corrosión, protege el material. Posee un fuerte poder de limpieza y un agradable aroma. RHEOSEPT-ID plus desinfectante para instrumental es especial para desinfectar los accesorios termolábiles como por ejemplo gastroscopios, coloscopios, broncoscopios, aparatos para anestesia y también objetos de vidrio, porcelana, metal, goma o plástico. Adecuado especialmente para todos los instrumentos odontológicos. RHEOSEPT-ID plus desinfectante para instrumental ha sido probado en los instrumentos de la marca STORZ, en los endoscopios de marca WOLF y los endoscopios de la marca OLYMPUS. Incluido en las listas de la VAH (Asociación Aplicada del Higiene), bajo las directrices de la DGHM (Sociedad Alemana para Higiene y Microbiología). Eficacia: bactericida, esporicida, fungicida, virucida (VIH, VHB, VHC, VACV, VDVB). Este producto medico está certificado de acuerdo a la CE (CE 0481).



➔ 20528352 RHEOSEPT-ID plus desinfectante para instrumental (Botella de 1000 ml)

P.V.P.: 38,79 €

Instrucciones de uso

| Tiempo de acción | Dosificación | Observación |
|------------------------|---------------------------|--|
| Efectivo en 5 minutos | 2 % | Bactericida / fungicida (VHA) con carga alta |
| Efectivo en 15 minutos | 0,5% (5 ml en 1 litro) | Bactericida / fungicida (VHA) con carga alta |
| Efectivo en 30 minutos | 0,25% (2,5 ml en 1 litro) | Bactericida / fungicida (VHA) con carga alta |
| Efectivo en 60 minutos | 0,25% (2,5 ml en 1 litro) | Bactericida / fungicida (VHA) con carga alta |
| Efectivo en 10 minutos | 2 % | Esporicida |
| Efectivo en 5 minutos | 2% (20 ml en 1 litro) | Virus con cubierta proteica (cápside) (VIH, VHB, VHC, VACV), mycobacterias (TBC) |
| Efectivo en 30 minutos | 1% (10 ml en 1 litro) | Virus con cubierta proteica (cápside) (VIH, VHB, VHC, VACV), mycobacterias (TBC) |
| Efectivo en 60 minutos | 0,5% (5 ml en 1 litro) | Virus con cubierta proteica (cápside) (VIH, VHB, VHC, VACV), mycobacterias (TBC) |



CE
0481

- ▶ actividad bactericida, fungicida y virucida excelente
- ▶ listo para usar y desinfección rápida libre de alcoholes
- ▶ seguridad comprobada gracias a su efecto remanente
- ▶ se puede desinfectar por lo menos 3 m² con 1 toallita
- ▶ libre de aldehídos y fenoles
- ▶ toallita empapada extra grande para la desinfección
- ▶ cuidadoso con la piel: Comprobado dermatológicamente con las mejores calificaciones
- ▶ efectivo a cabo de solo 1 minuto

RHEOSEPT-WDplus Toallitas

Toallitas de desinfección sin alcohol

Toallitas de desinfección empapadas. Producen su efecto después de solo 1 minuto. Muy buena capacidad de limpieza. Suave con los materiales. Adecuado para superficies impermeables como vidrio metacrilato. Aroma agradable. Dispensación completa del líquido activo absorbido para asegurar una buena desinfección. La toallita no desgasta el líquido activo.

▶ 20570003 RHEOSEPT-WD plus Toallita de desinfección 48 u. (300 x 270 mm)

P.V.P.: 9,74 €

Instrucciones de uso

| Aplicación | Dosificación | Observación |
|-------------------------|--------------|---|
| Efectivo en 60 segundos | sin diluir | rotavirus |
| Efectivo en 5 minutos | sin diluir | poliomavirus SV40 |
| Efectivo en 60 segundos | sin diluir | bactericida/fungicida EN 1276, EN 13697, EN 1650 |
| Efectivo en 30 minutos | sin diluir | noro-virus (MNV) EN14476 |
| Efectivo en 60 segundos | sin diluir | virus con envoltura (HIV, HBV, HCV, BVDV, vaccinia, influenza)E N 14476 |
| Efectivo en 5 minutos | sin diluir | bactericida/fungicida(VAH) baja carga mecánica |

Campo de aplicación



CE
0481

RHEOSOL

3. Impresiones

RHEOSEPT-ID form

Desinfectante para trabajos dentales con un alto grado de limpieza, siempre listo para usar

Siempre listo para usar en baños ultrasonidos o limpiadoras de agujas. Para una limpieza y desinfección de trabajos dentales e impresiones de poliésteres, siliconas, alginatos e hidrocoloideos. Sin alcohol. Con un aroma agradable. Rango de acción: bactericida, fungicida, virucida / virus con envoltura (VIH, VHB, VHC, TB, vaccinia, BVDV). Este producto sanitario tiene la certificación CE (CE0481).

➔ 20537352 RHEOSEPT-ID form Botella 1000 ml


P.V.P.: 12,55 €

- ▶ Apto para todo tipo de impresiones, dentaduras postizas usadas y otros trabajos dentales
- ▶ libre de aldehídos y fenoles
- ▶ con un alto grado de limpieza y amplio rango de acción
- ▶ actividad bactericida, fungicida y virucida (incluida la tuberculosis)
- ▶ suave con los materiales
- ▶ para el uso con baños ultrasonidos o limpiadoras de agujas.

Instrucciones de uso

| Tiempo de acción | Dosificación | Remark |
|------------------------|--------------|---|
| Efectivo en 5 minutos | sin diluir | bactericida/fungicida(acc. DGHM) alta carga mecánica |
| Efectivo en 15 minutos | sin diluir | virus con envoltura (HBV/HIV/HCV/vacciniavirus), mycobacteria (TBC) |

Campo de aplicación

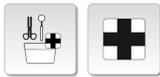

CE
0481

Todos los precios sin IVA - Fecha de la última modificación 11.05.2020

Importación y Distribución en España:



Kuss Dental, S.L.
c/ Isabel Colbrand, 10 Nave 95
28050 Madrid - España
Tel. 91 736 23 17
Fax 91 736 23 18
Movil: 608 578 686
info@kuss-dental.com

RHEOSEPT®