



Whiteness | #1

Peróxido de carbamida al 10% y al 16%

Caso Clínico Dra. Giraldez

TESTIMONIOS

*"Seguridad, predictibilidad y resultados rápidos sin hipersensibilidad.
Un blanqueamiento fácil de distribuir en la férula"*

Dra. Isabel Giráldez de Luis
Experta en Odontología Estética y Restauradora



Whiteness Perfect


Inicial



Cambio de carilla en P21
Alargamiento de bordes incisales de 12, 11 y 22



Macro y micro textura

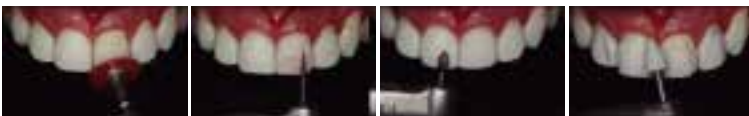


Blanqueamiento combinado FGM 16%



Pulido y brillo



Caso finalizado

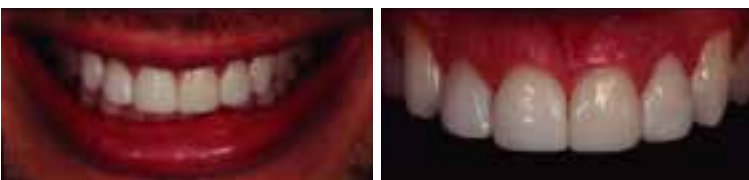

Primero se blanqueó de manera unitaria la P21, ya que tiene una obliteración del canal pulpar y no puede realizarse endodoncia, con Whiteness Perfect al 16% durante dos meses y posteriormente se blanqueó todo lo demás durante 3 semanas.



Inicial



Final



Caso Clínico

Dr. Orlando Reginatto



White Class
Vitra^{APS}

Transformación de la sonrisa a través de la reproducción de la translucidez y opalescencia incisal con composites restauradores



FINAL



INICIAL

EVALUACIÓN INICIAL

Dientes sin alteraciones estructurales y/o patologías, con desproporción en tamaño. La paciente presentaba restauraciones en las piezas 12 y 22. Presenta fractura vestibular en el 12.

Paciente del género femenino, 30 años.

QUEJA PRINCIPAL

Dientes cortos y restauraciones rotas.

TRATAMIENTO EJECUTADO

Basándose en el estudio clínico previo y en las fotos de la sonrisa y de la boca en descanso, se detectó que, al sonreír, ocurría amplia exposición gingival. Para cumplir con las expectativas y lograr mejor armonización de la sonrisa, se realizó gingivoplastia de los elementos 11 y 21 para aumentar la relación altura y anchura de esos elementos sin tener aumento incisal excesivo. No fue necesaria osteoplastia pues la profundidad de sondeo era mayor que 3mm. Después de la cicatrización, se retiró parte de la restauración de los dientes 12 y 22 en la faz vestibular, para promover contacto del gel con la estructura dental y se prosiguió tratamiento blanqueador, con **White Class** al 4%, durante 30 días.

Fue necesario cambiar las restauraciones y el material de elección fue la resina submicrométrica **Vitra APS**, que tiene óptimas propiedades ópticas y mecánicas para reproducción de características dentales naturales. Se optó por el recubrimiento vestibular total, a través de un recontorno cosmético en resina proporcionando un brillo natural.

Caso Clínico. Paso a paso Dr. Orlando Reginatto



Fig. 1a, 1b y 1c. Sonrisa inicial, guía canina derecha e izquierda, secuencialmente



Fig. 2. Registro de color previo al tratamiento blanqueador



Fig. 3. Aspecto inmediato después de procedimiento de gingivoplastia



Fig. 4 - Aspecto tras 30 días de tratamiento blanqueador, con White Class al 4% (FGM) y retirada de las restauraciones insatisfactorias con lámina 12 y fresas multilaminadas.



TIPS CLÍNICO:

La versatilidad de concentraciones de White Class proporciona total control de la sensibilidad post operatoria.



Fig. 5a. Después de correcto aislamiento, grabado ácido por 30 segundos con Condac 37 (FGM), lavado y secado



Fig. 5b. Aplicación del sistema adhesivo Ambar APS (FGM).



Fig. 6. Reproducción de la faz palatina con resina Vittra APS (FGM) en el color Trans OPL.



Fig. 7. Después del fotocurado de la resina palatina en incisivos centrales, se sigue con la estratificación de la capa de dentina utilizando el color DA0 del sistema Vittra APS (FGM).



Fig. 8 - Reproducción de los mamelones dentinarios con resina DA0 en incisivos centrales.



Fig. 9 - Diente 11 - Aplicación de la capa vestibular incisal en el color Trans OPL con ayuda de un pincel.



Fig. 10 - Diente 11 con cobertura final con Vittra APS (FGM) en el color de esmalte E-Bleach.



Fig. 11 - Vista incisal: comparación entre diente 11 ya con cobertura final con resina E Bleach y diente 21 aún por finalizar el incremento.



Fig. 12 - Dientes 11 y 21 con estratificación finalizada. Confección de la concha incisal de los incisivos laterales.



Fig. 13 - Reproducción dentinaria con resina DA0 (Vittra APS) en incisivos laterales.



Fig. 14 - Capa final con esmalte E-Bleach (Vittra APS) en incisivos laterales.



TIPS CLÍNICO:

El tiempo de trabajo aumentado de la resina Vittra APS bajo luz ambiente permite realizar la estratificación con paciencia y atención.



Fig. 15 - Delimitación de las áreas de luz y sombra.



Fig. 16a y 16b - Acabado con fresas multilaminadas



Fig. 17 - Pulido con pasta de pulido Diamond Excel (FGM) y discos de fieltro Diamond Flex (FGM).



Fig. 18 - Aspecto luego después del pulido.




Fig. 19 - Aspecto final lateral de perfil.



Fig. 20 - Aspecto final con destaque para destacando la translucidez y opalescencia incisal.



PRODUCTOS FGM UTILIZADOS:



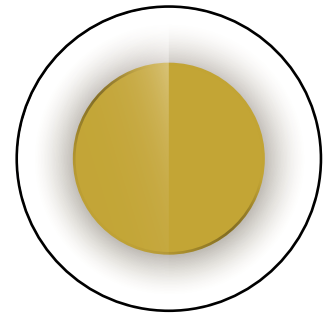

Caso Clínico

Dr. Rafael Cecato

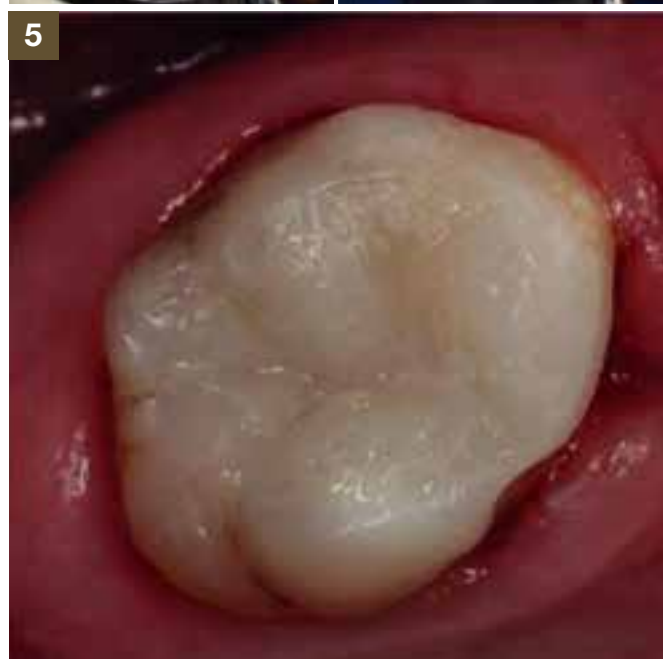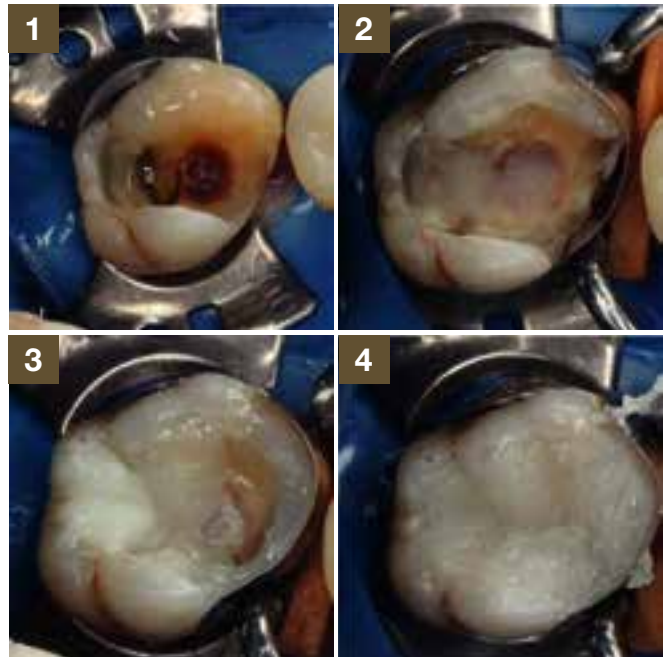

1. Cavidad.
2. Forrado de la pared pulpar con ionómero de vidrio.
3. Tres incrementos de resina Vittra APS Unique. Mesial curada copiando el color de la matriz. En el centro ya curada copiando el color del diente. En distal, no curada por lo tanto, aún no copiando el color del diente.
4. Restauración finalizada antes del pre-acabado/ pulido.
5. Restauración finalizada tras pulido e hidratación.

Cemento

CE 2797

Allcem Veneer APS

Cemento de resina fopolimerizable para carillas y micro carillas sin preparación.

Control total de la cementación

Tixotropía: excelente manipulación.



Indicaciones del producto



Combinación con Allcem Veneer Try-in: previsibilidad de color.



Estabilidad de color: longevidad estética.



Con fluorescencia: aspecto semejante al diente natural.



El 63% de carga inorgánica en peso: excelentes propiedades mecánicas

Cementación definitiva:

- Carillas sin preparación;
- Carillas en cerámicas y/o resina compuesta con hasta 1,5 mm de espesor sin infraestructura opaca.

Beneficios del producto

Mayor tiempo de trabajo en campo iluminado para posicionamiento de las carillas.

Máxima previsibilidad estética: no presenta variación de color y opacidad después del curado.

TESTIMONIOS

"Proporciona estabilidad de color previamente y post fotocurado y un tiempo de trabajo aumentado por esa nueva tecnología APS. Otra gran ventaja, son los colores de los try-ins, bien semejantes a los colores del cemento. Es decir, usted puede hacer la prueba más fidedigna cuando de la utilización de ese material."

Prof. Dr. Paulo Quagliatto

Coordinador del Curso de Especialización en odontología estética en APCD Ribeirão Preto.



Caso Clínico

Dr. Gonzalo Durán



Inicial



Final



Mini kit

~~297,80€~~
229,10€

~~42,55€~~
32,73€

~~85,10€~~
65,45€

Contenido: 3 jeringas con 2,5g cada una, en los colores: A1, OW y Trans, 3 jeringas Try-in con 2g cada una, en los colores: A1, OW y Trans, 1 Ambar APS con 2ml y puntas.

Contenido: 1 Try-in con 2g, en los colores: A1, A2, A3, Trans, Opaque White o E-Bleach M, y puntas.

Contenido: 1 jeringa con 2,5g, en los colores: A1, A2, A3, Trans, Opaque White o E-Bleach M, y puntas.

Ofertas del producto

REF.	DESCRIPCIÓN	P.V.P.	OFERTA
Varias	ALLCEM VENEER TRY-IN REFIL 2 GR (CE0086)		
	A1, A2, OPAQUE WHITE, TRANS REFIL	42,55 €	32,73 €
232114	ALLCEM VENEER APS MINI KIT (CE0086)	297,80 €	229,10 €
Varias	ALLCEM VENEER APS REFIL 2,5G (CE0086)		
	A1, A2, A3, E-BLEACH, OPAQUE WHITE, TRANS	85,10 €	65,45 €