

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
LEVANTE
PEELING EXFOLIANTE Y LIFTING.

5 ml



LEVANTE

PEELING LIFTANTE
PEELING LIFTING
EXFOLIANTE TENSOR
ESFOLIANTE TENSOR
СНЯТИЕ ШЕЛУШЕНИЯ
رفع التقشير

LEVANTE es una innovadora fórmula de cóctel de peeling que añade un efecto lifting iluminador a una exfoliación profunda desde el primer tratamiento. La sinergia molecular de sus componentes potencia la acción de cada ingrediente sin necesidad de neutralizador, gracias a su fórmula con aceite de oliva ozonizado. Un peeling de profundidad media sin efectos secundarios, que permite retomar la vida normal inmediatamente después del tratamiento.

INGREDIENTES:

- **Ácido cloroacético:** Acción exfoliante garantizada en alta concentración para un efecto iluminador inmediato de la piel. **Ácido pirúvico:** Potencia el efecto del TCA. **Aceite de oliva ozonoid:** Calmante, emoliente y regulador. **Ácido mandélico:** Acción hidratante y emoliente. **Ácido kójico:** Acción iluminadora, antioxidante y exfoliante. **Hexapéptido:** Efecto lifting significativo similar al del bótox. **DMAE:** Efecto lifting similar al del bótox.
-
-



APLICACIÓN: Tras una historia clínica completa y un examen de la zona a tratar, y tras desinfectarla completamente, aplique 1 ml del producto y masajee hasta su completa absorción. Espere aproximadamente de 3 a 4 minutos y repita el proceso de aplicación de la misma manera; se puede realizar una tercera aplicación a criterio del profesional.

DOSIS Y MÉTODO DE ADMINISTRACIÓN: La cantidad de producto contenida en el vial es orientativa; la dosis para cada caso individual queda a criterio del profesional. La frecuencia del tratamiento depende de varios factores: edad, tipo de piel, estilo de vida, etc.

PRECAUCIONES, CONTRAINDICACIONES, ADVERTENCIAS

No se debe utilizar Levante:

- En sujetos con procesos infecciosos o inflamatorios en las proximidades de la zona a tratar En sujetos con heridas o
- hematomas en las proximidades de la zona a tratar En mujeres embarazadas o en período de lactancia Si el envase está dañado
-

No inyectar. No ingerir. Mantener

fuera del alcance de los niños.

ALMACENAMIENTO

- Levante se conserva entre 2°C y 25°C. No
- Congelar. No exponer al calor.

DISPOSICIÓN

Si se utiliza en inodoros, deséchelo según las instrucciones. residuos especiales (Ref. Decreto Legislativo 152/2006 y modificaciones posteriores).

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MAKULA

PEELING EXFOLIANTE Y LIFTING

PARA IMPERFECCIONES DE LA PIEL 6ml



MAKULA
PEELING PER MACCHIE CUTANEE
PEELING FOR SKIN SPOTS
PEELING PARA MANCHAS DE LA PIEL
PEELING PARA MANCHAS DA PELE
ПИЛИНГ ДЛЯ ПЯТЕН НА КОЖЕ
لچلا عقيبلا ري شقت
PEELING POUR LES TACHES CUTANÉES

MAKULA es un peeling de liberación lenta para imperfecciones de la piel, diseñado para actuar sobre las capas superficiales, medias y profundas de la epidermis, previniendo efectos no deseados como edemas y congelación. La sinergia molecular de sus componentes potencia la acción de cada ingrediente sin necesidad de neutralizador, gracias a su fórmula con aceite de oliva ozonizado. Un peeling medio-profundo sin efectos secundarios que permite retomar la vida normal inmediatamente después del tratamiento.

INGREDIENTES:

- **Ácido monocloroacético:** precursor del TCA con acción exfoliante; reduce las imperfecciones superficiales de la piel, el melasma y las cicatrices del
- **acné;** reduce las líneas de expresión. **Ácido glicólico:** acción exfoliante; reduce las líneas de expresión y las manchas de la edad; aporta firmeza y
- **luminosidad a la piel. Argireline:** efecto lifting similar al bótox. **Ácido**
- **tranexámico:** ilumina y reduce la melanogénesis.



APLICACIÓN: Limpie la zona afectada, preferiblemente con un producto bifásico, para preparar la piel para el tratamiento. Masajee la zona afectada con el Pre-Peeling para que la piel esté más receptiva. Aplique el peeling Makula con masaje manual. Espere 30 segundos y aplique una segunda capa. Compruebe la reacción de la piel y, si es necesario, aplique una tercera capa. Después del tratamiento, masajee con el Post-Peeling para calmar la piel. Recomendamos aplicar una crema con FPS 50 para proteger la piel después del tratamiento.

DOSIS Y ADMINISTRACIÓN

La cantidad de producto contenida en el vial es Indicativo; corresponde al operador establecer la dosis para el caso individual.

La frecuencia del tratamiento depende de varios

factores: edad, tipo de piel, estilo de vida, etc.

PRECAUCIONES, CONTRAINDICACIONES, ADVERTENCIAS

No se debe utilizar Levante:

- En sujetos con procesos infecciosos o inflamatorios en las proximidades de la zona a tratar En sujetos con heridas o
- hematomas en las proximidades de la zona a tratar En mujeres
- embarazadas o en período de lactancia Si el envase está dañado
-

No inyectar. No ingerir. Mantener

fuera del alcance de los niños.

ALMACENAMIENTO

- Makula debe conservarse entre 2 °C y 25 °C. No congelar. No exponer al calor ni a la luz directa.

DISPOSICIÓN

En caso de utilización en sanitarios, eliminar como residuo especial

(Ref. Decreto Legislativo 152/2006 y modificaciones posteriores).

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ESKALO

EXFOLIANTE Y LIFTING
PEELING PARA ESTRÍAS Y
CICATRICES. 5 ml



ESKALO es un peeling cóctel para imperfecciones, estrías y cicatrices postacné. Se puede considerar un tratamiento exfoliante, biorevitalizante, iluminador y lifting. Está diseñado para actuar en las capas superficiales, medias y profundas de la epidermis, con liberación lenta, previniendo efectos no deseados como edemas y congelaciones. La sinergia molecular de sus componentes potencia la acción de cada ingrediente sin necesidad de neutralizador, gracias a su fórmula con aceite de oliva ozonizado. Un peeling medio-profundo sin efectos secundarios que permite retomar la vida normal inmediatamente después del tratamiento.

INGREDIENTES:

- **Ácido cloroacético:** efecto exfoliante moderado. **Ácido mandélico:** acción reestructurante. **Ácido kójico:** se utiliza principalmente para bloquear la melanogénesis; se utiliza para aclarar la piel o tratar afecciones como el melasma facial. **Ácido pirúvico:** exfoliante y reafirmante, promueve la producción de colágeno, fibras elásticas y la síntesis de glicoproteínas. **Extractos naturales:** acción amortiguadora y calmante.
-



APLICACIÓN: Limpie la zona afectada, preferiblemente con un producto bifásico, para preparar la piel para el tratamiento. Masajee la zona afectada con el Pre-Peeling para que la piel esté más receptiva. Aplique el peeling Makula con masaje manual. Espere 30 segundos y aplique una segunda capa. Compruebe la reacción de la piel y, si es necesario, aplique una tercera capa. Después del tratamiento, masajee con el Post-Peeling para calmar la piel. Recomendamos aplicar una crema con FPS 50 para proteger la piel después del tratamiento.

DOSIS Y ADMINISTRACIÓN

La cantidad de producto contenida en el vial es indicativo; corresponde al operador establecer la dosis para el caso único.

La frecuencia del tratamiento depende de varios factores:

edad, tipo de piel, estilo de vida, etc.

PRECAUCIONES, CONTRAINDICACIONES, ADVERTENCIAS

No se debe utilizar Levante:

- En sujetos con procesos infecciosos o inflamatorios en las proximidades de la zona a tratar En sujetos con heridas o hematomas en las proximidades de la zona a tratar En mujeres embarazadas o en período de lactancia Si el envase está dañado
-

No inyectar. No ingerir. Mantener

fuera del alcance de los niños.

ALMACENAMIENTO

- Eskalo debe almacenarse entre 2°C y 25°C.
- No congelar. No exponer al calor ni a la luz directa.

DISPOSICIÓN

En caso de utilización en sanitarios, eliminar como residuo especial

(Ref. Decreto Legislativo 152/2006 y modificaciones posteriores).

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

PROCEDIMIENTO DE PREDESENGRASADO

SOLUCIÓN PRE-PEELING



DEGREASER PRE PROCEDURE es una solución pre-peeling a base de ácido glicólico para la limpieza facial antes de un tratamiento de peeling. Esta solución se utiliza para eliminar la película sebácea que suele estar presente en la piel y hacerla más receptiva al tratamiento.

INGREDIENTES:

- **Ácido glicólico:** acción exfoliante; reduce las líneas de expresión y las manchas de la edad; aporta firmeza y luminosidad.
- **Ácido kójico:** acción iluminadora, antioxidante y exfoliante.
- **Aceite de árbol de té:** acción emoliente y calmante.



APLICACIÓN: Antes del tratamiento de peeling, para preparar la piel: aplicar 1 ml de producto y masajear hasta su completa absorción. Esperar dos minutos y comenzar a aplicar la primera capa. Se puede usar como tratamiento en casa aproximadamente 15 días antes del peeling en consulta o como exfoliante casero para prolongar su efecto. En estos casos, usar siempre el producto post-peeling después de su uso.

DOSIS Y FORMA DE ADMINISTRACIÓN La cantidad de producto contenida en el vial es orientativa, siendo responsabilidad del operador establecer la dosis para cada caso individual.

PRECAUCIONES, CONTRAINDICACIONES, ADVERTENCIAS Levante no debe utilizarse:

- En sujetos con procesos infecciosos o inflamatorios en las proximidades de la zona a tratar
- En sujetos con heridas o hematomas en las proximidades de la zona a tratar
- En mujeres embarazadas o en período de lactancia
- Si el envase está dañado
- No inyectar. No ingerir.

Mantener fuera del alcance de los niños.

ALMACENAMIENTO

- Conservar entre 2 °C y 25 °C. No congelar. No exponer al calor ni a la luz directa.

ELIMINACIÓN En caso de utilización en centros sanitarios, eliminar como residuo especial (Ref. Decreto Legislativo 152/2006 y modificaciones posteriores).

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

NEUTRALIZADOR POST- PROCEDIMIENTO

SOLUCIÓN POST-PEELING



POST PROCEDURE es una solución que ayuda a restaurar el pH de la piel y a calmarla después de las sesiones de peeling. Está compuesta por diversos extractos naturales con propiedades calmantes e hidratantes, y un poco de bicarbonato de sodio para eliminar los ácidos residuales que no se hayan neutralizado por completo.

INGREDIENTES: Glicerina, Bicarbonato de Sodio, Extracto de Flor de Árnica Montana, Aloe Barbados Hoja Jugo, Bisabololo, Metilcloroisotiazolinona, Metilsotiazolinona.



APLICACIÓN: Después del peeling, aplique el producto en la zona afectada, masajee durante 2-3 minutos y enjuague. Úselo siempre después de la última capa del peeling en la consulta o, en caso de tratamiento en casa, con un producto pre-peeling. Masajee hasta su completa absorción y úselo según sea necesario.

DOSIS Y FORMA DE ADMINISTRACIÓN La cantidad de producto contenida en el vial es orientativa, siendo responsabilidad del operador establecer la dosis para cada caso individual.

PRECAUCIONES, CONTRAINDICACIONES, ADVERTENCIAS Levante no debe utilizarse:

- En sujetos con procesos infecciosos o inflamatorios en las proximidades de la zona a tratar
- En sujetos con heridas o hematomas en las proximidades de la zona a tratar
- En mujeres embarazadas o en período de lactancia
- Si el envase está dañado

No inyectar. No ingerir.
Mantener fuera del alcance de los niños.

ALMACENAMIENTO

- Conservar entre 2 °C y 25 °C. No congelar. No exponer al calor ni a la luz directa.

ELIMINACIÓN En caso de utilización en centros sanitarios, eliminar como residuo especial (Ref. Decreto Legislativo 152/2006 y modificaciones posteriores).